

「皇輝石足温器」

日本の冷えと戦う皇輝石

製品概要

商品名	皇輝石足温器 SSK-5
サイズ	36.0X36.0X4.0(H)cm
希望小売価格	95,000円(税別) 102,600円(税込)
電源	家庭用100V 60W(0.06kw)
コード長	全長4.15m(中間部にコントローラ)
素材	枠 : 木製(ナラの無垢材) 温感部分: 皇輝石(こうきせき) ヒーター : カーボンヒーター
総重量	約5kg(本体4.7kg)
タイマー	30分・60分・8時間切り替え可能
温度調節	弱～強無段階(20℃～55℃)




PS 円岩盤石開発センター
株式会社
100V 60W
50/60Hz 屋内用

商品特徴


「遠赤外線」と「マイナスイオン」を放射する機能性特殊鉱石「皇輝石」を30cm角、厚さ1.5cmにスライスして、足温器の一面に敷いてます。更に、特殊鉱石の下から面状ヒーターで熱を加えて20℃から55℃まで温度調節が出来ます。もちろん家庭用100V電源でOK。テレビを見ながらでも、くつろいだ雰囲気、今、医療業界が注目している「遠赤外線温熱療法」を家庭でも実践できる商品です。電気代も1日8時間使用で一ヶ月に2～300円程度です。

ご使用方法 & 警告

- 【1】御使用になる30分前に電源を入れて、あらかじめ温めて御使用下さい。
- 【2】素足、靴下の厚さで体感温度が違いますので、最初はダイヤル7でご利用ください。温度は55℃以上にはあがりません。
- 【3】ヒーターの温度を上げすぎて、やけどや低温やけどを起こさないように充分ご注意ください。
- 【4】小さなお子様、身体の不自由な方のお一人でのご使用はおやめ下さい。大きな事故になる可能性があります。
- 【5】お茶、コーヒー等飲食物を取りながらのご利用はおやめ下さい。こぼした時に大きな事故になる可能性があります。

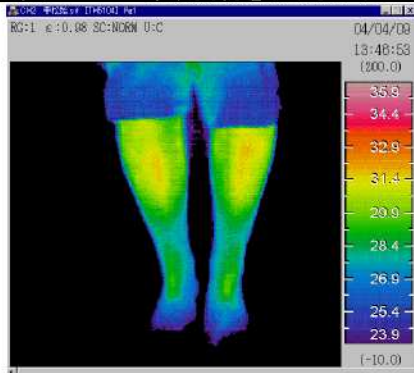

使用前

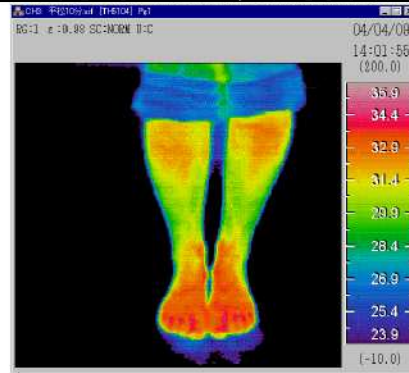

使用后

- 【1】写真左は使用前
- 【2】写真右は10分間使用后
- 【3】床の温度まで上がってます。
- 【4】足先から、向こう脛まで大きく変化が見受けられます。
★15分から20分で、まるで風呂上りのような暖かさが、足元から全身に伝わります。
- 【5】1ヶ月の電気代計算式の目安
消費電力0.06kwX1日使用時間8時間X1ヶ月25日使用X契約電気代単価
0.06X8X25X30=360円

撮影: 資料提供: 岡山県工業技術センター

日本の冷えと戦う「皇輝石」

体を温め毎日イキイキ健康生活を！
<http://www.ikuseikousen.com/>

円岩盤石開発センター株式会社
倉敷市吉岡295番地

TEL:086-441-2220(代)

FAX:086-441-2221

E-mail office@ikuseikousen.com