
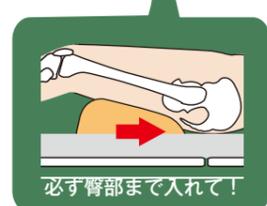


メディカルスワローの使用方法


- 1 ベッドの屈曲点(回転軸)に身体の屈曲点(上前腸骨棘から5cm下)を合わせます。身長の高い方は、膝あげ機構を解除して下さい。
- 2 スワローを大腿の付け根まで奥に差し込みます。
- 3 下肢全体を支えるようにピローを入れて、踵の圧迫を軽減します。
- 4 目的に合わせた角度まで背上げし、背上げ、背下げの前後は必ず圧抜き(背抜き、腰抜き、足抜き)してください。

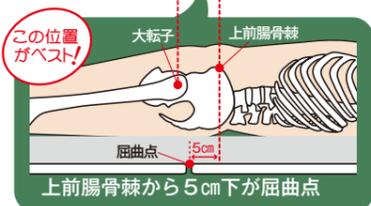

Q,1 スワローは背上げた時にしか使えないの?
A, 仰臥位で使用しても臀部の除圧効果が得られます。従って、背下げした後に敷いたままでも大丈夫です。

Q,2 何度の背上げまで除圧できますか?
A, 臀部の除圧は仰臥位~背上げ60°の範囲で有効です。ただし、60°を超えると効果が減少します。


ナーセント®Ex ロール ナーセント®Ex ワイド

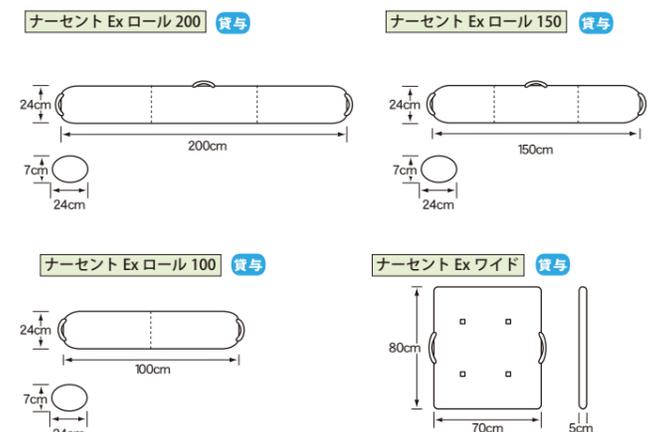

品名	価格	重量	TAISコード	JANコード
ナーセント Ex ロール 200	¥16,400	1,800g	00149-000034	4560232691330
ナーセント Ex ロール 150	¥13,400	1,350g	00149-000035	4560232691347
ナーセント Ex ロール 100	¥9,400	900g	00149-000036	4560232691354
ナーセント Ex ワイド	¥15,800	1,900g	00149-000037	4560232691361
ナーセントExロール200 専用防水カバー	¥5,000	-	-	4560232691552
ナーセントExロール150 専用防水カバー	¥4,400	-	-	4560232691569
ナーセントExロール100 専用防水カバー	¥3,400	-	-	4560232691576
ナーセントExワイド 専用防水カバー	¥4,800	-	-	4560232691583

材質 (本体) 表材: ポリエステル70%、綿30% 中材: ポリエステル繊維チップ
 (専用防水カバー) 表: ポリエステル100%、裏: ポリウレタンフィルム (ラミネート加工)

ナーセント®メディカルパット

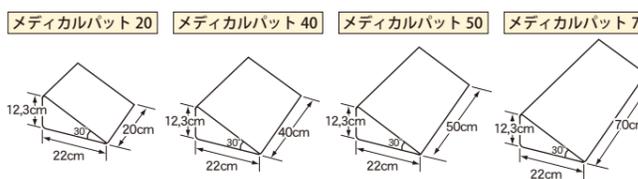

品名	価格	重量	TAISコード	JANコード
メディカルパット 20	¥4,200	170g	00149-000030	4560232691545
メディカルパット 40	¥6,200	310g	00149-000031	4560232691514
メディカルパット 50	¥8,200	380g	00149-000032	4560232691521
メディカルパット 70	¥9,500	520g	00149-000033	4560232691538
メディカルパット20用 替えカバー	¥900	-	-	-
メディカルパット40用 替えカバー	¥1,200	-	-	-
メディカルパット50用 替えカバー	¥1,500	-	-	-
メディカルパット70用 替えカバー	¥2,000	-	-	-

材質 (本体) クッション材: 低反発性特殊ウレタンフォーム 中袋: ポリエステル100%
 (カバー) 表: ポリエステル100%、裏: ポリウレタンフィルム (ラミネート加工)

ナーセント®メディカルスワロー



品名	価格	重量	TAISコード	JANコード
ナーセントメディカルスワロー	¥6,800	450g	00149-000029	4560232691453
ナーセントメディカルスワロー用 替えカバー	¥1,500	-	-	-

材質 (本体) クッション材: 低反発性特殊ウレタンフォーム
 (カバー) 表: ポリエステル100%、裏: ポリウレタンフィルム (ラミネート加工)

メディカルシリーズのご用命は

アイ・ソネックス株式会社

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7
 TEL: 086-200-1550 FAX: 086-200-1553
<http://www.nasent.net> ナーセント 検索

新発売!

ナーセント®Ex ロール・ナーセント®Ex ワイド

介護保険: 福祉用具貸与(体位変換器) 抜群のフィット感と復元性で、いつも快適なポジショニング

丸洗い、乾燥機 OK!!

オートクレープ 135° OK!!

135°C
オートクレープOK!

貸与 **ナーセント Ex ロール 200**
 ¥16,400 (税別)
 TAISコード: 00149-000034

貸与 **ナーセント Ex ロール 150**
 ¥13,400 (税別)
 TAISコード: 00149-000035

貸与 **ナーセント Ex ロール 100**
 ¥9,400 (税別)
 TAISコード: 00149-000036

貸与 **ナーセント Ex ワイド**
 ¥15,800 (税別)
 TAISコード: 00149-000037

体位変換用ハンドル付!

汚れが気になる方に! 全商品に防水カバー(別売)もご用意しております

Ex ロール 200 防水カバー	¥5,000
Ex ロール 150 防水カバー	¥4,400
Ex ロール 100 防水カバー	¥3,400
Ex ワイド 防水カバー	¥4,800

カラー: ベーバミントグリーン
 素材: [表] ポリエステル100%、[裏] ポリウレタンフィルム(ラミネート加工)

ナーセント®メディカルパット 様々な体型、症状の方に優しくフィット!!

カバー裏面防水 熱湯消毒 OK!

メディカルパット20
 ¥4,200 (税別)
 TAISコード: 00149-000030

メディカルパット40
 ¥6,200 (税別)
 TAISコード: 00149-000031

メディカルパット50
 ¥8,200 (税別)
 TAISコード: 00149-000032

メディカルパット70
 ¥9,500 (税別)
 TAISコード: 00149-000033

ナーセント®メディカルスワロー 背上げ時の圧迫とズレ防止に!!

ナーセントスワロー
 ¥6,800 (税別)
 TAISコード: 00149-000029

ナセント®Ex ロール・ナセント®Ex ワイド



よせる



ひろげる



そわせる

ポジショニングに最適な中材

中材に、流動性と形状保持性を備えた特殊繊維チップを使用しています。チップは、手で寄せたり拡げたりして動かしますが互いに絡み合うので、整えた形状が崩れにくいのが特長です。



体位変換に便利なハンドル付

ロールタイプ・ワイド共に体位変換に便利なハンドルが付いています。介助者は、仰臥位から側臥位への体位変換を簡単に負担なく行うことができます。



優しい肌ざわりの吸汗生地

表が天然綿、裏がポリエステル生地を2枚合せにしたオリジナル生地です。吸汗性や弾力性、伸縮性の良さにこだわって、肌に優しい生地に仕上げました。



丸洗い可能!オートクレーブ滅菌できる安心素材

丸洗いや乾燥機の使用ができます。乾燥機や天日干しでふんわり気持ち良く復元します。熱湯でのつけ置きや塩素系漂白剤での消毒、オートクレーブで滅菌ができるので、万一の時も安心です。



ナセント®メディカルパット・ナセント®メディカルスワロー

優れた体圧分散性と耐熱性の新素材

ウレタンメーカーと共同開発した体圧分散性や耐熱性に優れた特殊低反発性ウレタンです。身体に柔らかくフィットするので、床ずれリスクの高い方にもご使用いただけます。



感染症にも対応!

本体
100℃の熱湯でつけ置きができます。脱水後は、陰干ししてください。




カバー
2%以下に希釈した塩素系漂白剤の使用や、100℃の熱湯でつけ置きができます。洗濯機、乾燥機の使用も可能です。



メディカルスワローのメンテナンスも同じです



メディカルスワロー

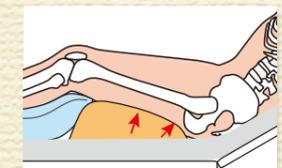


前滑りをストップ

臀部の圧力を大腿後面に分散し前滑りを防止します。例えば、食事介助時の姿勢安定などに便利です。


すべり座り



正しい背上げ姿勢

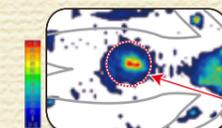


臀部圧力

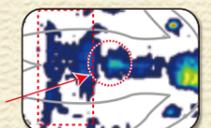

スワロー未使用時に比べ、臀部にかかる圧力が有意に低くなります。

日本褥瘡学会誌【Jpn JPU 11(1)40～46, 2009】
岡山県立大学保健福祉学部 森 将晏
「背上げ時における臀部の圧迫を軽減するクッションの制作とその効果の検証」より引用

使用例

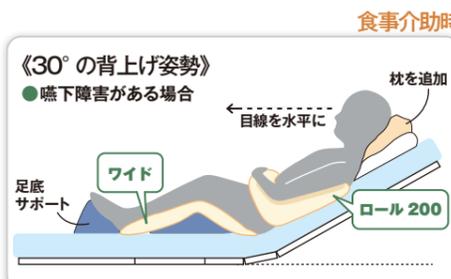

使用例



側臥位のQ&A

- Q,1 パットはどこまで差し込むの?**
下図の①のように、肩や上腕の重みがしっかりパットに乗るよう差し込みます。その際、パットを奥まで差し込みすぎないようにしましょう。
- Q,2 下肢のサポートはどうするの?**
上半身だけをサポートすると下半身にねじれが生じます。下図の②のように、必ず下肢にクッションを入れて、両下肢が重ならないよう骨盤幅に広げてください。
- Q,3 バンカー法ってなに?**
側臥位時のずれ落ちや不安定感の解消、筋緊張の緩和が目的です。下図の③のようにマットレスの下から、反対側の肩や腰の下にパットやタオルを入れて体をホールドする方法です。

